

	GRUPO IXION	CÓDIGO: FT-PRO-01	
	DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL.	VERSIÓN: V1.01	
	GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810,	EMISIÓN: 05/08/25	
	IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO.	ELABORO: ING. JAHH	
R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044			
FICHA TÉCNICA			
NOMBRE DEL PRODUCTO:	BOLSA AMARILLA PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS		
TAMAÑO:	30X40		
IMAGEN:	 		
CÓDIGO DE COMPRA:	BA30X40		
CLAVE CUADRO BÁSICO:	N/A		
DESCRIPCIÓN:	LAS BOLSAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, VETERINARIAS, ETC.		
FINALIDAD DEL USO:	PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: RESIDUOS PATOLÓGICOS SOLIDOS. LA BOLSA NO PODRÁ SER ABIERTA O VACIADA. CUANDO SE ENCUENTRE LLENO AL 80% DE SU CAPACIDAD, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002.		
CARACTERÍSTICAS:	ADECUADAS PARA QUE LA RADIACION GAMMA ESTERILICE LOS DESECHOS. INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS). SIN FUELLE.		
INDICACIÓN DE USO:	PREPARAR LA BOLSA: SACA UNA BOLSA DEL PAQUETE Y ÁBRELA POR COMPLETO HASTA QUE ALCANCE SU TAMAÑO MÁXIMO.		
	COLOCAR LA BOLSA: PON LA BOLSA EN UN CESTO O SOPORTE, PARA QUE SE MANTENGA ABIERTA Y ESTABLE.		
	LLENAR LA BOLSA: DESECHA EN LA BOLSA ELEMENTOS COMO, RESIDUOS PATOLÓGICOS SÓLIDOS, DESECHOS QUE NO SEAN PUNZOCORTANTES O QUE NO PUEDAN RASGAR LA BOLSA.		
	CERRAR LA BOLSA: CUANDO LA BOLSA LLEGUE AL 80% DE SU CAPACIDAD, O SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL HOSPITAL, DEJA DE USARLA Y HAZ UN NUDO.		
	LIMPIAR EL CESTO/SOPORTE: ANTES DE PONER UNA NUEVA BOLSA, SANITIZA EL CESTO O SOPORTE SIGUIENDO LAS POLÍTICAS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL.		

ADVERTENCIAS/ PRECAUCIONES:	PROBLEMAS	SOLUCIONES
	RUPTURA EN BOLSA	COLOCAR UNA NUEVA BOLSA EN LA PARTE INFERIOR, ENCUBRIENDO LA BOLSA DAÑADA
	PESO EXCEDE CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE BOLSA	PAUSAR SU USO Y UTILIZAR UNA NUEVA BOLSA

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:		NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
MATERIAL:				
		POLIETILENO VIRGEN DE BAJA DENSIDAD, CON ADITIVOS PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES		
COLOR:				
		AMARILLO TRASLÚCIDO		
DIMENSIONES:				
	MEDIDA:		DIMENSIÓN (CENTÍMETROS)*	DIMENSIÓN (PULGADAS)*
	ANCHO		30	11.8
	ALTURA		40	15.7
	CALIBRE		0.076	0.003
EMPAQUE Y ENVÍOS:				
TIPOS DE EMPAQUE:		BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA		
BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX				
PIEZAS	100 BOLSAS			
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	32	14.5	3.5	1.748
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES				