

 GRUPO IXION	GRUPO IXION DIRECCIÓN: AVENA NO. 153, COL. GRANJAS ESMERALDA, C.P. 09810, IZTAPALAPA, CDMX, MÉXICO. R.F.C. GIX990115K16 TEL. 55 55815044	CÓDIGO: FT-PRO-01	
		VERSIÓN: V1.01	
		EMISIÓN: 05/08/25	
		ELABORO: ING. JAHH	

FICHA TÉCNICA	
NOMBRE DEL PRODUCTO:	BOLSA AMARILLA PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS
TAMAÑO:	90X120
IMAGEN:	 
CÓDIGO DE COMPRA:	BA90X120
CLAVE CUADRO BÁSICO:	N/A
DESCRIPCIÓN:	LAS BOLSAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS DE GRUPO IXION, ESTÁN DISEÑADOS PARA DESECHAR DE MANERA SEGURA LOS RESIDUOS PRODUCIDOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, VETERINARIAS, ETC.
FINALIDAD DEL USO:	PERMITE EL DESECHO SEGURO DE: RESIDUOS PATOLÓGICOS SOLIDOS. LA BOLSA NO PODRÁ SER ABIERTA O VACIADA. CUANDO SE ENCUENTRE LLENO AL 80% DE SU CAPACIDAD, ÉSTE DEBERÁ SER DESECHADO DE ACUERDO CON LA NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
CARACTERÍSTICAS:	ADECUADAS PARA QUE LA RADIACION GAMMA ESTERILICE LOS DESECHOS. INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE (LIBRE DE PLOMO Y METALES PESADOS). CON FUELLE.
INDICACIÓN DE USO:	PREPARAR LA BOLSA: SACA UNA BOLSA DEL PAQUETE Y ÁBRELA POR COMPLETO HASTA QUE ALCANCE SU TAMAÑO MÁXIMO.
	COLOCAR LA BOLSA: PON LA BOLSA EN UN CESTO O SOPORTE, PARA QUE SE MANTENGA ABIERTA Y ESTABLE.
	LLENAR LA BOLSA: DESECHA EN LA BOLSA ELEMENTOS COMO, RESIDUOS PATOLÓGICOS SÓLIDOS, DESECHOS QUE NO SEAN PUNZOCORTANTES O QUE NO PUEDAN RASGAR LA BOLSA.
	CERRAR LA BOLSA: CUANDO LA BOLSA LLEGUE AL 80% DE SU CAPACIDAD, O SEGÚN LAS POLÍTICAS DEL HOSPITAL, DEJA DE USARLA Y HAZ UN NUDO.
	LIMPIAR EL CESTO/SOPORTE: ANTES DE PONER UNA NUEVA BOLSA, SANITIZA EL CESTO O SOPORTE SIGUIENDO LAS POLÍTICAS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL.

ADVERTENCIAS/ PRECAUCIONES:	PROBLEMAS	SOLUCIONES
	RUPTURA EN BOLSA	COLOCAR UNA NUEVA BOLSA EN LA PARTE INFERIOR, ENCUBRIENDO LA BOLSA DAÑADA
	PESO EXCEDE CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE BOLSA	PAUSAR SU USO Y UTILIZAR UNA NUEVA BOLSA

NORMA PARA LA FABRICACIÓN:		NOM-087-ECOL-SSA1-2002		
MATERIAL:				
		POLIETILENO VIRGEN DE BAJA DENSIDAD, CON ADITIVOS PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES		
COLOR:				
		AMARILLO TRASLÚCIDO		
DIMENSIONES:				
		MEDIDA:	DIMENSIÓN (CENTÍMETROS)*	DIMENSIÓN (PULGADAS)*
		ANCHO	90	35.4
		ALTURA	120	47.2
		CALIBRE	0.076	0.003
EMPAQUE Y ENVÍOS:				
TIPOS DE EMPAQUE:		BOLSA PLÁSTICA TRASLÚCIDA		
BOLSA PARA ENVÍOS DENTRO DE CDMX				
PIEZAS		100 BOLSAS		
DIMENSIONES DE EMPAQUE:	LARGO [CM]*	ALTO [CM]*	ANCHO [CM]*	PESO [KG]*
	53	44	9	15.508
*LAS MEDIDAS PUEDEN PRESENTAR LIGERAS VARIACIONES				